

ar يُرجى قراءة جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
استخدم الأداة حسب توجيهات الطبيب السريري المؤهل.
واتبع دائمًا بروتوكول المرفق الخاص بك للتقليم وتحديد الموضع.

Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner البالغين

يُستخدم منتج أداة تحديد الموضع للأشخاص البالغين والشباب الموجودين في المستشفى.

وصف المنتج

تتكون أداة تحديد الموضع من وسط ممّيع مُكوّن من زيت سيليكون وكريات مجهرية وحبيبات بولي إيثيلين مغلفة جميعها بطبقة خارجية من البولي يوريثان. يمكن تشكيل أداة تحديد الموضع لدعم الأشكال التشريحية والاحتياجات السريرية المتعددة.

الاستخدام المقصود

صُمّمت Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner لتوفير إمكانية تحديد موضع المريض، وإعادة توزيع الضغط، و/أو تفريغ المواضع التشريحية، التي يمكن استخدامها كجزء من العلاج الوقائي للمساعدة على منع حدوث قرح الفراش.

دواعي الاستخدام

البالغين والشباب

- تحديد موضع المريض، وتقليبه، وإعادة تحديد موضعه.
- تفريغ العقب، وعظم العجز ، والقدال (مؤخرة الرأس)، والبروزات العظمية الأخرى.
- معالجة النقع.

العمر الافتراضي

ستتلف خصائص المنتج نتيجة استخدامه بمرور الوقت. تعتمد نسبة هذا التلف على استخدام المنتج وبيئة استخدامه. يمكن استخدام المنتج مع مريض واحد حتى يتلف المنتج ولم يعد يحقق الاستخدام المقصود منه

معلومات أخرى:

لا يمكن ضمان خصائص المنتج عند استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. تتم طباعة تاريخ انتهاء صلاحية المنتج على ملصقات العبوة.

تعليمات الاستخدام

- قم بإزالة أداة تحديد الموضع من الكيس البلاستيكي الشفاف.
- يلزم وضع غطاء أو بياضات أداة تحديد الموضع بين جلد المريض وأداة تحديد الموضع دائمًا أثناء الاستخدام.
- ضع أداة تحديد الموضع بشكل مناسب أسفل المريض.
- قم بتشكيل أداة تحديد الموضع بعناية باتجاه موضع المريض/الموضع التشريحي لدعم الموضع المطلوب والحفاظ عليه، وذلك بما يحقق إعادة توزيع الضغط لتقليل القوى المقرطة على الجلد.
- يمكن تشكيل أداة تحديد الموضع لاستيعاب المعدات الطبية أو خلوص مجرى الهواء.
- يمكن إعادة تشكيل أداة تحديد الموضع بسهولة لاستيعاب الاحتياجات السريرية المتغيرة.
- في حال تلف المنتج (على سبيل المثال بسبب مدة الاستخدام) ولم يعد لديه القدرة على الاحتفاظ بالموضع المطلوب، فيجب التخلص منه واستبداله.

إن أدوات تحديد الموضع آمنة للاستخدام مع الرنين المغناطيسي ويمكن استخدامها أيضًا أثناء التصوير بالأشعة المقطعية. وفي حال استخدامها مقترنة بالتصوير بالأشعة السينية، فلا تقم بالتصوير بالأشعة السينية لأنها قد تشوه الصورة.

إرشادات التنظيف والصيانة

- استخدم مُطهِّرًا مُعتمدًا من جهة المصنِّفِ أو مُطهِّرُ/منظفًا منزليًا مضادًا للميكروبات وفقًا للإرشادات الموجودة على ملصق أداة تحديد الموضع. وتجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مواد مبيضة. بالإضافة إلى أن استخدام المطهِّرات التي يكون أساسها مادة الكحول لفترات طويلة قد يؤدي إلى تقليل عمر المنتج.
- إذا كان الوسط المميع يبدو غير متجانس، يمكن استعادة المنتج عن طريق القولبة والتشكيل بشكل متكرر.

تحذيرات

- يجب الإشراف على المرضى وملاحظتهم في مرافق الرعاية الصحية بشكل ملائم عند استخدام أدوات تحديد الموضع.
- لا تسمح للمرضى بالانكباب على الوجه في أداة تحديد الموضع بدون مراقبتهم عن قرب بسبب وجود خطر الاختناق.
- لتجنب ثقّب الأداة، كن حذرًا عند مناولة الأشياء الحادة الموجودة بالقرب من المنتج.
- عند التعامل مع المنتج، خاصة أثناء تشكيله، لا تستخدم أظافر الأصابع وتجنب ارتداء الخواتم ذات الحواف المرتفعة أو الحادة.

الاحتياطات

- استبدل أداة تحديد الموضع على الفور في حال تعرضها للتعب أو التلف.
- في حال ثقّب الأداة، يجب وضعها في كيس بلاستيكي مُحكم الإغلاق لتجنب انسكاب محتواها، مما قد يزيد من خطر حدوث الانزلاق والسقوط.
- لا تستخدم جهاز التعقيم أو الميكروويف.
- لا تقم بالتصوير بالأشعة السينية عند استخدام أداة تحديد الموضع.

شروط التخزين/المناولة الخاصة

يجب تخزين Mölnlycke Z-Flo Fluidized positioners في درجة حرارة تقل عن ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجة فهرنهايت).

قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة إلى تلف المنتج قبل انتهاء العمر الافتراضي.

معلومات أخرى:

- لا تُستخدم أداة تحديد الموضع مع أكثر من مريض (تُستخدم مع مريض واحد فقط).
- يُعدّ المنتج غير معقم. فلا تقم بتعقيمه.
- غير قابل للإصلاح من قِبل المستخدم.
- غير قابل للاشتعال وفقًا لمعيار SS-EN ISO 12952-1، والمعيار SS-EN ISO 12952-2.
- هذا المنتج غير سام.
- يجب أن تتم عملية التخلص من المنتج وفقًا للإجراءات البيئية المحلية. ويمكن حرق المنتج للتخلص منه.

إذا وقع أي حادث خطير مرتبط باستخدام Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner، فينبغي إخطار شركة Mölnlycke Health Care به وكذلك الجهة المحلية المختصة لديك.

MD

- en** Medical Device
- de** Medizinprodukt
- fr** Dispositif médical
- es** Producto sanitario
- nl** Medisch hulpmiddel
- sv** Medicinteknisk produkt
- it** Dispositivo medico
- fi** Lääkinnällinen laite
- pt** Dispositivo médico
- da** Medicinsk udstyr
- el** ιατροτεχνολογικό προϊόν
- pl** Wyrób medyczny
- cs** Zdravotnický prostředek
- hu** Orvostechikai eszköz
- no** Medisinsk utstyr
- sl** Medicinski pripomoček
- bg** Медицинско изделие
- ro** Dispozitiv medical
- sk** Zdravotnícka pomôcka
- tr** Tıbbi Cihaz
- lt** Medicinos priemonė
- lv** Medicīniska ierīce
- et** Meditsiiniseade
- ru** Медицинское изделие
- hr** Medicinski proizvod
- sr** Medicinsko sredstvo
- ar** جهاز طبي